



A teszt előnyeiről, a mintavétel- és a tesztelés menetéről, valamint a kapott eredmények kiértékeléséről és értelmezéséről részletes információk a www.oxygenihairtest.hu oldalon állnak rendelkezésre.

PROFIL LÉTREHOZÁSA

A mintavételi adatlap kitöltése mellett szükséges létrehozni weboldalunkon, az [oxygenihairtest.hu](http://www.oxygenihairtest.hu) oldalon egy analízis profilt a vizsgált alany számára. Különösen ügyelni kell arra, hogy a profil létrehozásakor pontosan ugyanaz a név kerüljön megadásra, mint ami a mintavételi űrlapon szerepel, hiszen így tudjuk később a kapott eredményeket a páciens digitális profiljához csatolni.

A teszt eredménye 4-6 héten belül kerül magyar nyelven a páciens jelszóval védett fiókjába, így kizárólag ő tudja megtekinteni és letölteni. A lelet beérkezéséről a páciens az általa megadott e-mail címen értesítjük.

MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ

Fontos, hogy a haj (vagy egyéb testszörzet) mintavétele az útmutatónak megfelelően történjen, hiszen a nem megfelelően vett minta torzíthatja a vizsgálati eredmények pontosságát!

A beküldött haj- vagy szörzetminta hossza 2,5-3,5 cm lehet, amennyiben nem áll rendelkezésre kellő hosszúságú lenőtt haj vagy testszörzet, el kell halasztani a mintavételt.

Az elemzéshez 125 mg haj vagy szörzet szükséges. Az ideális mennyiség kimérhető a csomagban található papír mérleg segítségével.

A MINTAVÉTEL ELŐTT

1. Ellenőrizzük, hogy a páciens haja megfelel-e a mintavételi feltételeknek:

- A hajminta nem kizárólag a fejbőről származhat. Abban az esetben, ha a vendégnek nincs a mintavételhez szükséges mennyiségű vagy hosszúságú haja, lehetséges szakáll vagy hónalj szörzet beküldése is, ezekből pontosan ugyanannyi mennyiség és hosszúság szükséges, mint a hajmintából.
- Az elemzéshez KEZELETLEN minta szükséges, azaz nem lehet festett, dauerolt, higrogénezett vagy egyéb kemikáliákkal kezelt. Amennyiben a páciens haja vagy szörzete jelenleg nem felel meg ennek a kritériumnak, a pontos eredmények érdekében érdemes addig halasztani a mintavételt, amíg kellő hosszúságú (kb. 3,5 cm) kezeletlen lenövés keletkezik.
- A hajnak a mintavételkor tisztának kell lennie, nem lehet rajta hajlakk, hajszelé, olaj vagy egyéb hajpótló/hajformázó készítmény. A mintavétel előtt szintén kerülendőek a magas cink tartalmú korpásodás elleni samponok, mert ezek torzíthatják az eredményt. 24 óránál több idő ne teljen el az utolsó hajmosás és a mintavétel között! A legjobb ha közvetlenül mosás és szárítás után vágjuk le a mintát.

2. Ellenőrizzük, hogy minden szükséges dokumentum megtalálható-e a kapott csomagban:

- Papír mérleg
- Mintavételi útmutató és adatlap kitöltési segédlet
- Adatlap
- Kis boríték a mintának (2 db)
- Trace Elements részére címzett boríték
- Légpárnás boríték
- Oxygeni Hair Kft. részére címzett matrica

3. Ellenőrizzük, hogy rendelkezésre állnak-e a mintavételhez szükséges eszközök:

- Jó minőségű acél olló vagy ritkító olló (a ritkító olló ajánlott)
- Fésű
- Csát
- Vonalzó vagy mérőszalag
- Előkészített papír mérleg

4. Mérleg előkészítése:

A jelölt hajtásvonal mentén hajtsuk be a füleket, majd a meghajtogatott mérleget helyezzük vízszintes felületre. A mérleg akkor billenhet csak át, amikor a megfelelő mennyiségű hajminta a téglalappal kijelölt részre kerül. Ha a mérleg láthatóan sérült vagy minta nélkül is átbillen a mérő oldalra, abban az esetben használjunk egy másik mérleget. 125 mg haj körülbelül egy púpozott teáskanálnyi hajnak felel meg.

A HAJMINTA VÁGÁSA ÉS MÉRÉSE

1. Fésűvel válasszuk szét a haját, majd a felső részét rögzítsük egy csattal.
2. A mintavételhez jó minőségű rozsdamentes acél ollót vagy ritkító ollót használjunk és olyan közel vágjunk a fejbőrhöz, amennyire csak lehetséges!
3. Vágjuk le a mintának szánt tincset egy olyan részről, amit utána egy másik hajtincs el tud takarni.
4. Kezdjük a mintavételt középről és onnan haladjunk a tarkó felé. A mintákat kis tincsenként, a fejbőr 3-5 különböző pontjáról gyűjtsük be. Abban az esetben, ha csak a hátsó részeken van kezeletlen (festetlen) haj, onnan vágjuk le a megfelelő mennyiséget.
5. A levágott tincset vágjuk 3 cm hosszúra. A mintának a hajtőhöz közelebbi részt kell tartalmaznia! A felesleges hajvég kidobható.
6. Helyezzünk annyi mintát a mérlegen található téglalapra, amennyitől a mérleg átbillen. Ha szükséges, folytassuk a vágást addig, amíg elegendő haját nem sikerül gyűjtenünk. Ne feledkezzünk meg a pót minta begyűjtéséről!

GARANCIA ÉS PÓT MINTA

Ha a vendég festés vagy egyéb rendszeres kezelés mellett kifejezetten a mintavétel kedvéért növesztette le a haját, akkor a beküldésre szánt minta mellett erősen ajánlott egy adag pót mintát is vágni és félre tenni. - ezt a vendég tartsa magánál! Amennyiben bármi probléma merül fel a szállítás során (csomag sérülése, eltűnése), az Oxygeni Hair Kft. pénzvisszafizetési garanciát vállal vagy gondoskodik a teszt újbóli díjmentes kiküldéséről.

A MINTAVÉTELI ADATLAP KITÖLTÉSE

A hajszövet analízis elvégzéséhez elengedhetetlen a csomagban található ANGOL nyelvű adatlap hiánytalan kitöltése. A csomagban található MAGYAR nyelvű adatlap csak segítségként szolgál a kitöltéshez, illetve az angol nyelvű kifejezések megértéséhez, ERRE A LAPRA NE ÍRJUNK! Az előre kitöltött adatokat átjavítani vagy kihúzni nem szabad! Központunk minden beérkező adatlapot ellenőriz és kizárólag hiánytalanul kitöltött adatlapot tartalmazó csomagot továbbít a laboratóriumba feldolgozásra.

- A **páciens neménél** az angol rövidítés szükséges megadni: nő - F (female), férfi- M (male)
- Ha a vendég magyarországi származású, az **etnikai származásnál** az „other” lehetőség jelölendő, mellé a vonalra pedig a „european” megnevezést kell írunk.

A MINTA CSOMAGOLÁSA ÉS BEKÜLDÉSE

1. A minta levágását és mérését követően helyezzük a mintát a tiszta hajgyűjtő borítékba. (A csomagban található legkisebb boríték.) Majd zárjuk le a borítékot. Hasonlóan járjunk el a pót mintával is.
Tilos a mintát műanyag zacskóban tárolni! Szintén tilos kapcsolót, tűzőgépet vagy ragasztót használni a boríték lezárásához!
2. Töltsük ki a kis borítékon kért adatokat:
Patient - annak a neve, akitől a minta származik - ugyanaz a név, ami a mintavételi űrlapra került,
Shampoo - a mintavétel előtt használt sampon márkája, **Doctor account no.** - hagyjuk üresen
Lab no. - hagyjuk üresen
3. A mintát tartalmazó lezárt borítékot helyezzük a Trace Elements Laboratórium számára címzett közepes méretű borítékba, a kitöltött angol nyelvű adattal együtt. Ezt a borítékot ne zárjuk le!
4. A labor részére címzett borítékot a magyar nyelvű útmutatóval és segédlettel együtt helyezzük a mappába, a mappát pedig az Oxygeni Hair kft. részére címzett légpárnás borítékba. Több hajminta esetén egy légpárnás borítékba akár 5-6 mappa is helyezhető és feladható egy csomagként.
5. A légpárnás borítékra ragasszuk fel az Oxygeni Hair kft. számára címzett matricát és írjuk a feladó címét a bal felső sarokba (szalon neve, címe, hajgyógyász neve). Ezt a csomagot futárcégünkkel szükséges elküldeni az Oxygeni Hair Kft. részére. A megfelelő méretű légpárnás boríték a webshopban megrendelhető. Egy légpárnás borítékba 5-6 mintavételi mappa is belefér, így egy borítékban több mappa is beküldhető.
6. A minta feladásához a futárt a hairtest@oxygenihair.hu e-mail címen lehet megrendelni a felvételi nap megjelölésével. Ügyeljünk, hogy olyan napot jelöljünk meg, amikor biztosan át tudjuk adni a csomagot, mert sikertelen csomagfelvétel esetén a szállítási költség a teszt beküldőjét terheli.

A csomagfelvétel nem kérhető 24 óránál közlebbi időpontra! Ha több, mint 7 nap telik el a mintavétel és a beküldés között, akkor nem tudjuk garantálni a 4-6 héten belüli eredményt.

5 munkanapon belül maximum egy alkalommal tudunk futárt küldeni, így ha több minta kerül feladásra, akkor heti egy csomagban kérjük ezeket összegyűjteni és egyben feladni!